

TENGA MEN'S LOUPE

TENGA メンズルーペ
スマートフォン用精子観察キット

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください。

特徴

- 550 倍のレンズで泳ぐ精子を簡単に観察できます。
※観察状況により見え方には差があります。
- 観察の際は、見るコツが必要です。
ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- 本製品は、簡易的な観察キットです。
医学的判断をするものではありません。
- 4 回分の観察シート付き。

詳細はWEBで
tengahealthcare.com



採取手順

精液の採取

① トレーから採取計量カップと採取ピックを取り出します。カップの中に射精します。射精後 10 分ほど放置し、採取ピックで精液をよく攪拌した後、採取します。(10 分程度放置することで、半固形化状態の精液が液化化し、採取・観察し易くなります)



精液の計量

② 射精後 10 分ほど放置し、液体化した精液を採取計量カップの計量部に移動させます。採取計量カップを下の図のように目線の高さに持ち、正面から目盛りを読み、精液量を確認してください。

※ WHO の調査による射精量の基準値は 1.5ml。



観察のコツ

ルーペレンズとスマートフォンの調整

- ルーペ本体の裏には粘着シートがついています。
スマートフォンに軽く押しつけて固定してください。
- 取り付け位置がよくわからない場合は、スマートフォンの画面を見ながらルーペレンズの中心が画面の中心に映し出されるように調整してください。
- スマートフォンのフロントカメラを使用し、平らな台の上に置いて調整してください。

よく見えない時は…

- 照明(光源)を一つにしてください。スポットライト(LED)の利用をおすすめします。
- カメラに光源を向けます。光源とカメラの距離を変えてみてください。
- 昼間の明るい部屋では見えづらいことがあります。部屋をなるべく暗くし、照明を一つだけ用意して観察してください。
- レンズが汚れた場合は柔らかい布や綿棒で優しく拭き取り、よく乾燥させてください。

ピントが合わず、ぼやける時は…

- ルーペ本体とプレートが浮いてしまうとピントが合いません。しっかり磁石で密着するように調整してください。
- スマートフォン側のピントが合わない場合は、画面をタッチしてピントを合わせてください。
- 精液は微量で観察できます。量が多いとぼやけてしまう場合があるので調整してください。

フロントカメラ(画面側)で見えにくい時は…


- スマートフォンのバックカメラを利用すると、より大きな画角で観察できます。
(スマートフォンの機種により差があります。)
- スマートフォンの機種や観察環境により見え方が異なります。

体調や環境により精子の見え方が変わりますので、日をあけて何度か観察しましょう。

△ ご使用上の注意 ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は精液中に精子が存在しないことを保証するものではありません。
妊娠を望まない場合は、適切な避妊方法を実施しましょう。
- 本製品で太陽は絶対に見ないでください。
- 直射日光の当たる場所に保管しないでください。
- ルーペレンズに精液をつけないでください。
- ルーペレンズは水洗いしないでください。
- ルーペ本体をねじ曲げないでください。破損するおそれがあります。
- ルーペレンズを強く押さないでください。見えづらくなります。
- ルーペレンズにプレートの裏面を強く擦り付けないでください。
レンズが傷つくおそれがあります。
- ご使用後の返品交換はいたしかねます。
- 本製品は個人観察用であり、医療行為、医療判定等をするためのものではありません。
- 幼児の手の届かなくところに保管してください。
- 精液の付着によるスマートフォンの故障につきましては、責任を負いかねます。

各部名称

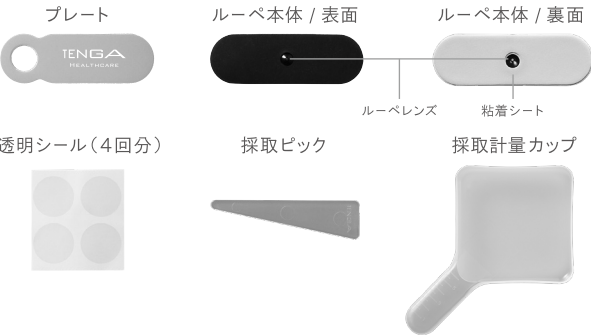

- ⑤ プレートを表にし、透明シール粘着部分に微量(米粒大1滴)の精液を、採取ピックで円の中心部に塗布します。
※ 精液は微量で観察できます。
量が多いとぼやけてしまう場合があります。



- ⑥ プレートの輪の中心がスマートフォンにセットしたルーペ本体のレンズ中心になるように、調整しながら乗せます。単一の光源をカメラに対して垂直に当てて観察します。
※ 複数の光源があるときれいに見えません。
プレートを動かしながらピントが合うところで観察します。
※ 液だれにお気をつけください。
※ 粘着シートは複数回貼ったり剥がしたりできます。スマートフォンのカメラ位置や仕様に応じて、シール位置を調整してください。粘着力が弱くなったら、水洗いをすると粘着力が戻ります。



- ⑦ 観察後はプレートをルーペ本体から外し、透明シールをはがします。プレート、ルーペ本体が汚れた場合は、軽く湿らせた布で拭き取り乾燥させてください。保管する際は、ルーペ本体の粘着シートをプレートの裏に張り合わせて保管してください。



メンズルーペを使用した見え方の例
スマートフォンの機種により見え方が異なります。

仕様

名称	テンガメンズルーペ
品番	TML-001
拡大レンズ	φ0.8ボールレンズ
保持・視野移動	磁石方式
拡大倍率	550倍※1

※1 レンズ自体は光学約550倍の性能ですが、実際の表示の倍率は
ご使用のスマートフォンのカメラ性能および液晶の性能により異なります。

販売元：株式会社 TENGАヘルスケア
製造元：株式会社 TENGА
意匠出願中・特許出願中 MADE IN JAPAN

本製品は、株式会社 TENGАヘルスケアによる製品です。
本製品に記載されている会社名および製品名は、商標または登録商標です。本製品に記載の本製品写真および顕微鏡撮影映像はすべてイメージです。実際の製品または顕微鏡撮影映像とは異なる場合があります。本製品にスマートフォン本体および照明器具は付属していません。本製品の仕様は予告無く変更することがあります。

製品に関するお問い合わせ	
tengahealthcare.co.jp	TENGАお客様相談センター ☎ 0120-0721-38 ※ 平日10:00～19:00(土・日・祝は除く)