

**再使用禁止**

衛生用品02 コンドーム

管理医療機器 男性向け避妊用コンドーム JMDNコード:36282000

**サンライズ****【警告】**

コンドームの適正な使用は、避妊に効果があり、エイズを含む他の多くの性感染症に感染する危険を減少しますが、100%の効果を保証するものではありません。

**【禁忌・禁止】****・再使用禁止**

- ・天然ゴムラテックスのアレルギー既往歴がある方の使用禁止
- ・油性物質及び揮発性物質との接触禁止

**【形状・構造及び原理】**

・主原料：天然ゴムラテックス

・形状：ナチュラルタイプ

・原理：本製品は性交渉の際、性器接触前にペニスに装着することにより、互いの粘膜及び体液の接触を防ぐことで避妊及びSTDを予防することができるとする原理である。

**【使用目的・効能又は効果】**・避妊、性感染症予防の補助**【品目仕様等】** 日本工業規格JIS T 9111-1:2000に準ずる

**【使用上の注意】**①コンドームの使用は、1個につき1回限りです。その都度、新しいコンドームをご使用ください。②コンドームには爪や歯、その他硬いものに強く触れないようにしてください。その時のキスが使用中破れの原因となります。③この製品は天然ゴムラテックスを素材にしています。天然ゴムラテックスは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまねに起こすことがあります。このような症状をおこした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。④このコンドームは、男性のペニスに装着し、女性の膈内に挿入する性行为に適用するよう設計されています。これ以外の使用は破れる危険があります。⑤エイズ(AIDS)を含む性感染症は、接触感染です。コンドームは必ず性器接触の前に装着して下さい。避妊を目的とする場合でも、はじめから装着して下さい。精子は射精時のみならず、射精前後でも流出します。引き続き性行为を行う時は、特にご注意ください。⑥膈内に挿入する座薬、外部性器に塗布する軟膏などの医薬品やベビーオイル、マーガリン、ローション、ハンドクリームなどと接触すると、コンドームが劣化し、破れる危険があります。コンドームの使用時には、これらと接触しないよう注意してください。

**【貯蔵・保管方法及び使用期限等】**①下記の場所に保管しないでください。a.直射日光の当たる場所 b.高温多湿の場所 c.防虫剤などの揮発性物質のある場所②購入時の包装に入れたまま保管し、その都度、取り出してください。個別包装のまま携帯しないでください。③使用期限は、包装容器裏面をご覧ください。使用期限を過ぎたコンドームは破れる危険がありますので使用しないでください。

**【操作方法又は使用方法】**①コンドームは性器接触前にペニス勃起状態になってから、ペニスに装着してください。②使用直前にコンドームを個別包装内の端によせ、コンドームから遠い端を指で破り、コンドームにキズを付けないよう取り出してください。(図1)③コンドームには表裏があります。表裏をよく見てから亀頭の上に置きます。(図2)この際、空気を抱きこまないように、コンドームの先端の精液溜まり部分を軽く押さえてください。(図3)④コンドームを、ゆっくりと両手の指でペニスの根本に向かってごしながら、根本までかぶせてください。(図4)この際、表裏を間違えずと装着ができません。⑤射精後は、すみやかにコンドームを押さえながら、ゆっくりと膈外へ抜き出してください。⑥使用したコンドームは水洗トイレに流さず、各自自治体の処分方法に従ってください。

図1



図2

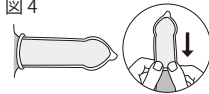


表(女性器側) 裏(男性器側)

図3



図4

**【包装】** 包装容器に記載**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

・製造販売業者  
株式会社サックス 千葉県稲毛区園生町893-18

TEL 043-207-6301

・製造業者  
タイニッポンラバー インダストリー  
THAI NIPPON RUBBER INDUSTRY CO.,LTD  
・生産国 タイ

この添付文書を必ずご参照ください