

SEED POD

精液運搬用保温器

取扱説明書 / ご使用上の注意

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本用紙をよくお読みください。



SEED POD

精液運搬用保温器



SEED POD mini


精液運搬用保温器

製品仕様

内容物	本体、フタ、パッキン
品名	シードポッド / シードポッド ミニ
品番	SCT-11 / SCT-01
外形寸法	74 × 74 × 124 mm / 58 × 58 × 88mm
対応採取容器サイズ	直径:63 mmまで 高さ:82 mmまで / 直径:49 mmまで 高さ:58 mmまで
素材	本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴム
生産国	中国

[SCT01NNG05-11] [SCT11NNG05-10]

各部名称

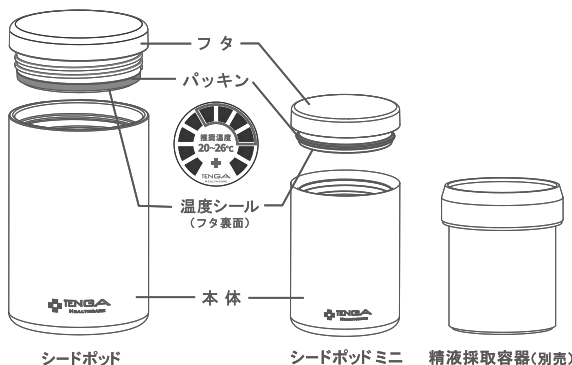

使用方法

- 1 ご使用前に室温を 20~26°C に調整の上、フタを外して本体内の温度を室温と同じにします。
※室温はフタ表面の温度シールを参考にして頂くことができます。
- 2 精液採取容器に採精しフタを閉め、本製品に格納します。
- 3 本製品を、フタが確実に閉まった状態で、なるべく早く医療機関まで持って行きます。

ご使用上の注意

- 採精、及び本製品の使用は、必ず室温を 20~26°C に調整した上で行ってください。
- 必ずフタにパッキンを取り付けた状態でご使用ください。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 必ず専用の精液採取容器をご使用ください。
- 精液採取容器はフタをしっかり閉めた状態で、本製品に格納してください。
- 専用の精液採取容器の入手方法は、本製品を購入した医療機関にお問合せください。
- 持ち運ぶ際は万一の漏れを防ぐため、本製品を縦置きにしてください。
- 精液を入れたまま、長時間放置しないでください。

お手入れについて

- 汚れが気になる場合は、ぬるま湯で薄めた石鹸や中性洗剤をご使用ください。洗浄後は、柔らかい布で水気をふき取り、十分乾燥させてください。
- 食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
- 煮沸しないでください。
- 塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン、金属たわし、クレンザーアルコール、みがき粉、熱湯は使用しないでください。傷やサビ、変色変形の原因になります。
- 本体外側には漂白剤を使用しないでください。印刷、シールなどのはがれの原因になります。

保管について

- 長時間ご使用にならないときは、高温多湿の場所を避けて保管してください。

警告

- 分解や修理、改造をしないでください。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
- 本製品は精液運搬用です。本来の目的用途以外に使用しないでください。
- 精液は専用の精液採取容器に採取した状態で本製品に格納してください。絶対に本製品に直接精液を入れてください。
- ストーブやコンロなど火気のそばに近づけないでください。
- 電子レンジに入れしないでください。
- 本体外側の底に貼ってある保護シールは、絶対にはがさないでください。保温不良の原因になります。

製品に関するお問い合わせ

メールアドレス contact@tengahealthcare.co.jp

お客様相談センター ☎ 0800-170-7831

受付時間: 平日10時~19時(土・日・祝は除く)

製造販売元: 株式会社TENGAヘルスケア tengahealthcare.co.jp